

Belleza ahora
y para siempre

Implante dental Eztetic® de 3,1 mmD

Simplicidad y estabilidad protésica

- Opciones protésicas de fácil aplicación para atender las necesidades protésicas del odontólogo
- La conexión cónica Double Friction-Fit™ aporta precisión y estabilidad
- El perfil de emergencia del pilar de diseño contorneado está concebido para ofrecer espacio al tejido blando y facilitar la emergencia estética de la restauración

Estética inmediata

- La geometría del implante y el protocolo quirúrgico permiten obtener una gran estabilidad primaria¹
- Colocación y provisionalización inmediata cuando esté clínicamente indicado*

* La carga inmediata está indicada en casos de buena estabilidad primaria y carga oclusal adecuada

Diseñado para obtener resultados duraderos

- El diseño coronal del implante, así como el cambio de plataforma (Platform Switch) integrado y la precisión de la interfase entre el implante y el pilar, contribuyen a preservar la cresta ósea²
- Las características de diseño del implante se han combinado para lograr una resistencia excepcional¹ en comparación con otros implantes estrechos disponibles comercialmente



Vea las posibilidades protésicas



Tornillos de cicatrización,
postes de impresión y
prótesis provisionales



Prótesis cementadas



Prótesis completa



Pilares personalizados
y CAD/CAM**

**No disponibles en todos los mercados

 **ZimVie**

SOLUCIONES DENTALES ZimVie


Tres principios en una conexión

Por primera vez se ha combinado una conexión cónica de tipo Double Friction-Fit y Platform Switch y el resultado ha sido una conexión al pilar de alta tecnología.

- Diseñada para reducir los micro-movimientos y las micro-filtraciones gracias a la precisión de la interfase entre el implante y el pilar, que contribuye a preservar la cresta ósea y la estabilidad del pilar
- Una conexión cónica de gran longitud (3,0 mm) distribuye las fuerzas hacia las partes más profundas del implante y reduce las tensiones que soporta la cresta ósea

Inserción sencilla


1. Alinee el hexágono del pilar con el hexágono del implante y aplique una leve fuerza vertical.
2. El encaje del pilar indica que el alineamiento es correcto.
3. Apriete el pilar hasta 30 Ncm para garantizar su inserción completa.

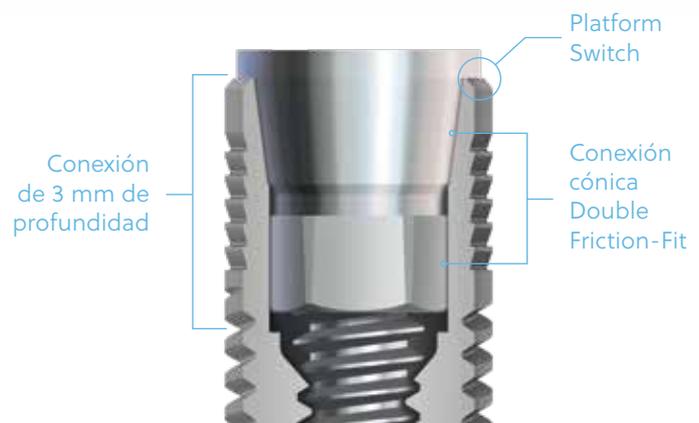

Resistencia implantaria a la fatiga¹

Los implantes Eztetic de 3,1 mmD tienen un 43% más de resistencia a la fatiga que otros implantes de la competencia de diámetro similar.¹

1. Datos de archivo.
2. Shin SY, Han DH. Influence of a microgrooved collar design on soft and hard tissue healing of immediate implantation in fresh extraction sites in dogs. Clin Oral Implants Res. 2010;21:804-814.

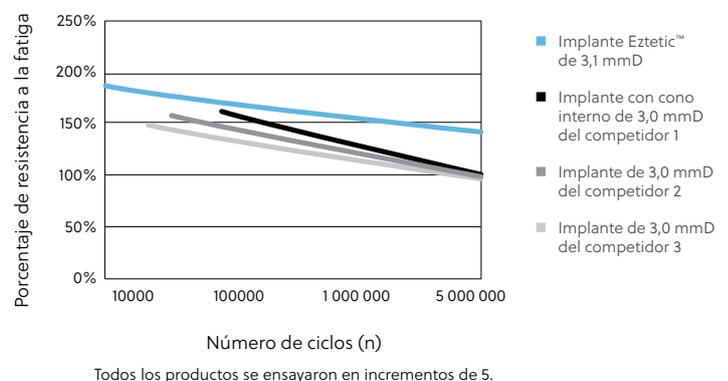

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de ZimVie, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie Dental. ZV1198ES REV A 11/23 ©2023 ZimVie. Todos los derechos reservados.

